









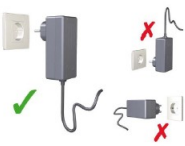


Aufbauanleitung Pflegebett Dali

Nr.	Abbildung	Beschreibung
1		<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteil (Ist am Rahmen unten gekennzeichnet)
2		<ul style="list-style-type: none"> • Liegefläche Kopfteil • Gekennzeichneter Bereich = Galgenaufnahme
3		<ul style="list-style-type: none"> • Liegefläche Fußteil
4		<ul style="list-style-type: none"> • Liegefläche Kopfteil und Liegefläche Fußteil zusammenstecken.
5		<ul style="list-style-type: none"> • Pflegebett seitlich aufstellen und den Motor mit Splint verbinden.

Nr.	Abbildung	Beschreibung
6		<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteil vom Pflegebett und Liegefläche zusammenstecken
7		<ul style="list-style-type: none"> • Fußteil mit Liegefläche verbinden
8	  <p>Montageschlüssel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seitengitter einbauen • Danach alle Schraube mit dem Montageschlüssel festziehen
9	 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrische Stecker verbinden • Galgen in die Aufnahme • Netzteil in die Steckdose stecken (siehe Abbildung) • Bettfunktion prüfen

Eine Video-Anleitung finden Sie unter → <https://youtu.be/LghHXQoFORY>

Bei Fragen wenden sie sich bitte an unser Kundenservice

TAPPE Kundenservice
Tel.: 05 7071
office@tappe.at